

OTIBLOCK®

Kulak Spreyi

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olur ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer rahatsızlığınız kötüleşir ya da makul bir süre içerisinde iyileşmez ise, uzman bir doktor ile görüşünüz.

OTIBLOCK® nedir ve ne için kullanılır ?


OTIBLOCK® kulak spreyi kulak kirinin dış kulak kanalından temizlenmesine yardımcı olur.

OTIBLOCK® bir uygulama pompasına sahip 45 ml'lik bir şişede sunulmaktadır. Etkin madde olarak hidrojen peroksit içermektedir. Kulak kirinin, temizlenmesi daha kolay, küçük parçacıklara ayrılmasına yol açan oksijen salımı yoluyla etkisinin göstermektedir. Ayrıca, bu şekilde kulak yıkama ihtiyacını giderebilmektedir.

Hidrojen peroksit'e ek olarak bu ürün, dış kulak kanalının fizyolojisi ile uyumlu hafif asidik bir pH'ı korumak amacıyla bir tampon olarak görev yapan bir stabilizör de içermektedir.

OTIBLOCK®'un uygulanması

OTIBLOCK® şekilde gösterildiği gibi, dış kulak kanalında kullanım için özel olarak tasarlanmış bir uygulama pompası yardımı ile uygulanmaktadır.

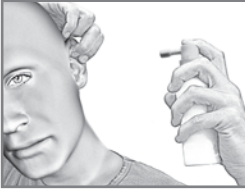

Kafanızı öne eğiniz ve kulağınızı hafifçe geriye çekiniz.



Uygulama pompasını dikkatlice dış kulak kanalına yerleştiriniz ve 4 ila 5 kez basınız. Başınızı 5 dakika kadar öne eğik tutunuz.



Sıvının akıp kurumasını sağlamak için başınızı ters tarafa çeviriniz.



Uygulama pompasını su ile temizleyiniz ve kurutunuz. Sonraki uygulamalar için saklayınız.

Günde üç kez tekrarlayınız.

OTIBLOCK®'u kullanmadan önce işitme cihazınızı kulağınızdan çıkarınız.

OTIBLOCK® kullanmayınız:

Eğer,

- hidrojen peroksit'e allerjiniz var ise,
- kulak zarınız delik ise veya kulak zarı ile ilgili bir sıkıntınız var ise ya da şüpheleniyor iseniz,
- kulak çınlamanız var ise ve/veya duyma problemi geçmişine sahip iseniz,
- baş dönmeniz ya da herhangi bir kulak iltihabınız (örneğin, ağrı, enfeksiyon, akıntı) var ise, lütfen bu ürünü kullanmayınız.

Önlemler ve muhtemel yan etkiler:

OTIBLOCK® aldığınız diğer herhangi bir ürün veya ilaç ile etkileşime girmeyecektir. Ancak, yine de diğer kulak ürünleri ile birlikte kullanmayınız. Oksijen salımı geçici bir fokurdama hissiyatına sebep olabilmektedir.

Kulak çözeltilerinin rahatsızlığa, duyma kaybına, baş dönmesine ve kulak çınlamasına sebep olabileceği bildirilmiştir. Bu etkilerden şikayetçiyse, lütfen araç veya makine kullanmayınız. Nadir durumlarda, ağızda kötü bir tad hissiyatı bildirilmiştir.

Lütfen şişeyi tekrar doldurmayınız.

Lütfen şişenin altında yer alan son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Bu ürün kıyafetleri boyayabilmektedir.

Ürünün göz ile temas etmesi halinde, lütfen derhal bol su ile yıkayınız.

Yutmayınız.

Zehirlenme halinde, lütfen Ulusal Zehir Merkezini arayınız.

Muhafaza koşulları:

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ambalajı açılmamış olsa dahi, şişenin altında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

2°C ila 30°C arasında saklayınız.

Bileşim:

Hidrojen peroksit % 3, stabilizör.

Son revizyon tarihi: Nisan 2016



Üretici Firma:
Mitelos Bioscience S.L. Parc Tecnològic del Vallès
Ronda de Can Fatjó 7-B
08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona, España
info@mitelos.com | www.mitelos.com

İthalatçı Firma:
OC Farma İlaç A.Ş.
Eskişehir Yolu, Söğütözü Mah. 2177. Sokak
Blok: 10-B / 105, Çankaya, Ankara, Türkiye
info@ocfarma.com | www.ocfarma.com

